


Инструкция по сборке герметизирующих систем


В состав комплекта поставки DuraSeal®, DuraSeal® Хаст и VascuSeal® входят следующие компоненты:

- 1 Ампула с порошком PEG (полиэтиленгликоля) (1).
- 2 Шприц для разбавляющего реагента (синяя метка) с синим колпачком (1).
- 3 Шприц для введения прозрачного прекурсора с белым колпачком (1).
- 4 Y-образный аппликатор (1).
- 5 Упор для двух шприцев (1).
- 6 Колпачок поршня (1).
- 7 Наконечник распылителя для аппликатора (3).

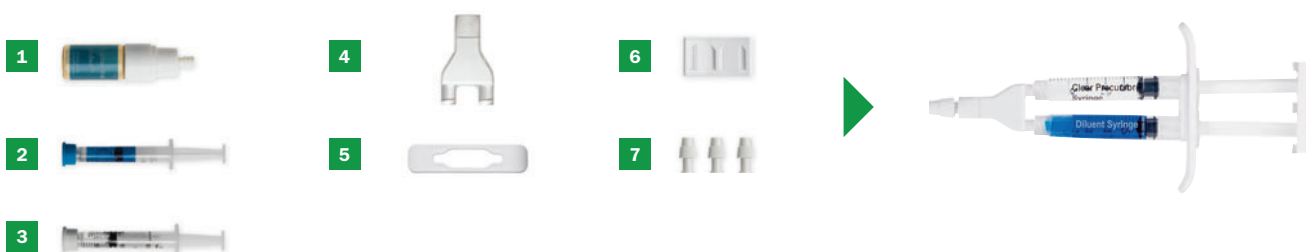

Инструкция по применению:

- 1 Нажмите на резьбовую часть колпачка ампулы с порошком.
- 2 Убедитесь, что красная линия более не видна.
- 3 Навинтите шприц с разбавляющим реагентом на флакон с порошком и впрысните содержимое во флакон.
- 4 Осторожно встряхните блок ампула/шприц, чтобы порошок полностью растворился.
- 5 Переверните блок ампула/шприц вертикально и втяните содержимое ампулы обратно в шприц.
- 6 Удалите лишний воздух из обоих шприцев и убедитесь, что объем компонентов в шприцах совпадает.

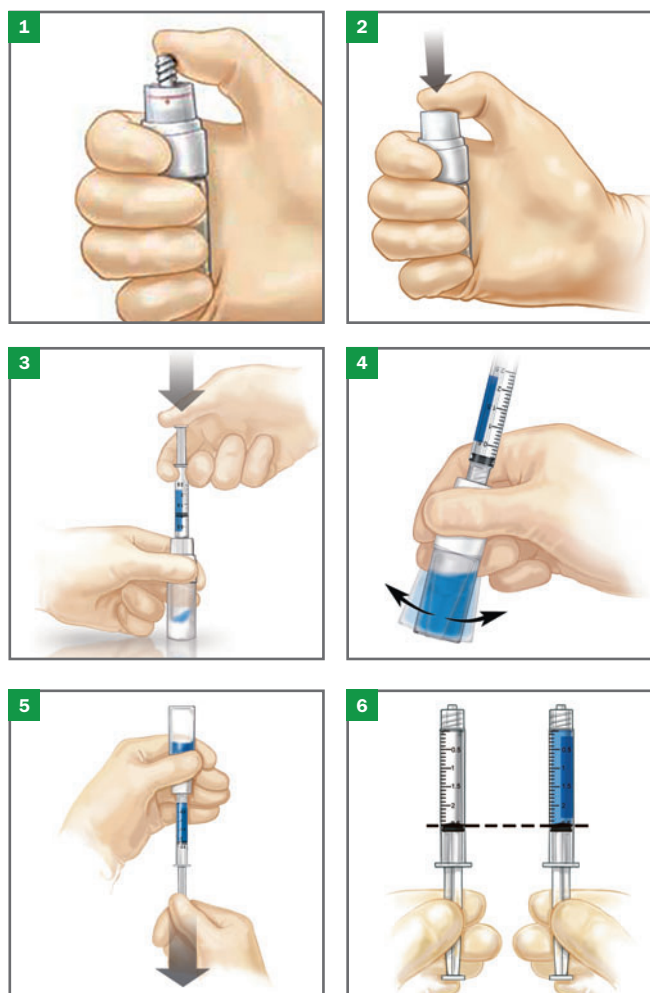

Инструкция по сборке герметизирующих систем

7 Присоедините к аппликатору шприцы с прозрачным и голубым прекурсорами.





8 Присоедините упор (держатель), который надевается на цилиндры обоих шприцев.

9 Аккуратно прикрепите плунжерный колпачок к плунжерам обоих шприцев.

10 Присоедините наконечник распылителя к аппликатору.

11 Первую порцию герметика распылите на салфетку.

12 Распыляйте герметик в рану. Слой не более 1–2 мм.

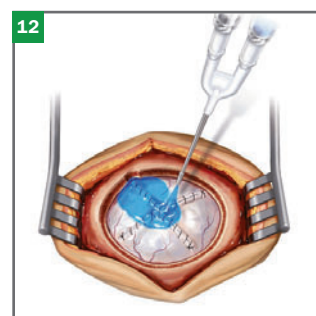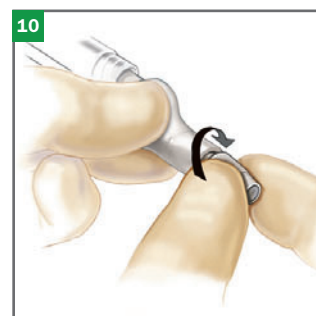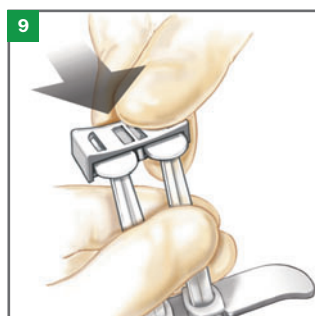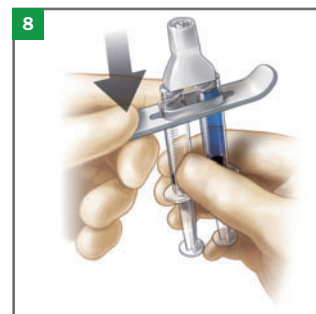

Советы

- Старайтесь не прикасаться к колпачку плунжера до начала работы устройства, чтобы избежать случайного впрыскивания прекурсора и закупорки наконечника.
- Если в результате прерывания подачи произошла закупорка наконечника распылителя, снимите наконечник распылителя, протрите наконечник аппликатора, присоедините новый наконечник распылителя и продолжайте подачу.
- Избыточное количество гидрогеля может быть удалено при помощи ножниц или путем механического отрыва.