


ETHICON

PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES

Профилактика образования спаек

Interceed

Рассасывающийся
противоспаечный барьер

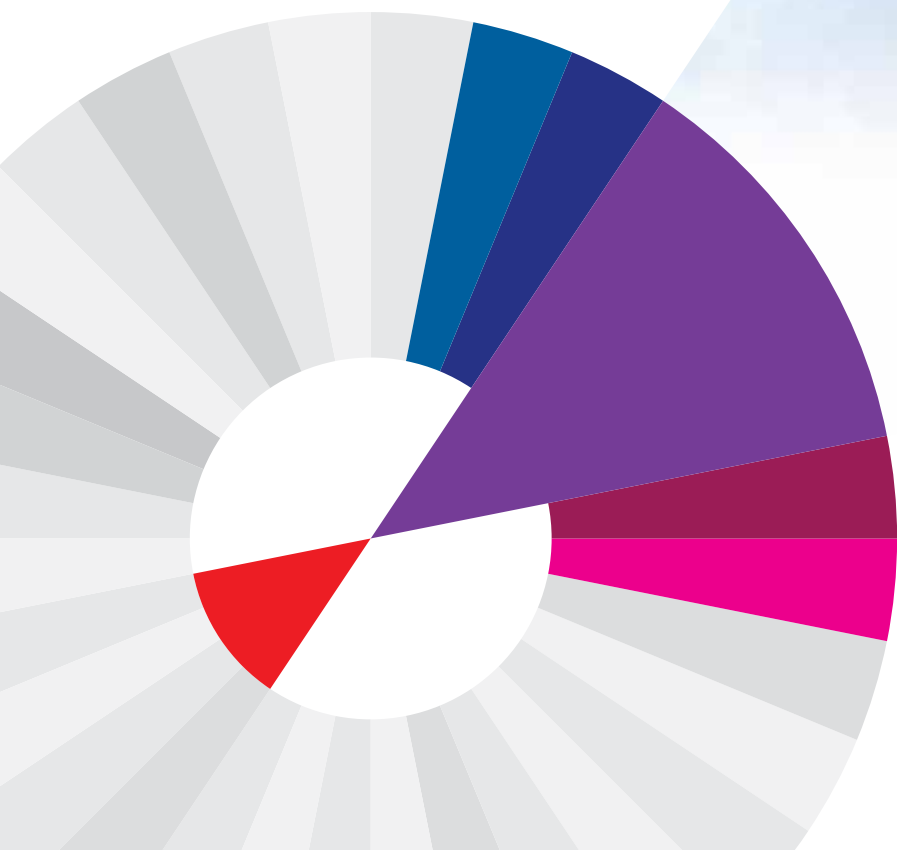

Interceed

Рассасывающийся противовоспалительный барьер

Безопасный и эффективный метод местной профилактики образования спаек



Виды операций, при которых показано применение Interceed:

- адгезиолизис
- хирургическое лечение эндометриоза
- операции на придатках
- миомэктомия
- фимбриопластика
- внематочная беременность
- гистерэктомия
- кесарево сечение

Действие:

Interceed уменьшает образование спаек при гинекологических, акушерских и хирургических операциях на брюшной полости. Interceed помещается в сухом виде на поврежденную поверхность после осуществления тщательного гемостаза и физически отделяет травмированную поверхность в течение периода реперитонеализации. При правильном использовании легко наносится и рассасывается в течение 4 недель. Скорость рассасывания зависит от ряда факторов, включая размер используемого материала и размер поврежденного участка. Interceed химически состоит из окисленной регенерированной целлюлозы, которая достоверно не увеличивает бактериальный рост*.

Показания:

Interceed используется при открытых (лапаротомических) хирургических, гинекологических и акушерских операциях для уменьшения частоты послеоперационного спайкообразования.

Противопоказания:

Применение Interceed противопоказано при наличии инфекций. Interceed не применяется в качестве гемостатического агента.

Форма поставки:

Упаковка, содержащая 10 стерильных салфеток размером 7,5 x 10 см.



* Применение барьера interceed в профилактике послеоперационных спаек после лапаротомии: метаанализ эффективности и безопасности метода Роберт Р. Франклин¹, Дж. Ричард Трout², Майкл Г. Маркс³ и Дэвид М. Уайзмен³

¹ Бейлоровский медицинский колледж, Хьюстон, Техас

² Отдел статистики, Университет Ратджерса, Нью-Брансуик, Нью-Джерси

³ Johnson & Johnson Medical, Inc., Арлингтон, Техас

Код для заказа	Наименование на английском	Наименование на русском	Количество
M4350	Interceed T7	Интерсид 7,5 x 10 см	1

Продукция сертифицирована РУ № ФСЗ 2009/05633

За дополнительной информацией обращайтесь:

ООО «Джонсон & Джонсон»
отдел «Этикон Гинекология»
Россия, 121614 Москва,
ул. Крылатская, 17, корп. 3, этаж 2
Тел.: + 7 495 580 7777; факс: + 7 495 580 7878

ETHICON

PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES

Для медицинских специалистов