

STRATAFIX® PGA-PCL* (Полиглекапрон)

Монофиламентный синтетический
рассасывающийся шовный материал с
насечками для безузловой фиксации тканей



STRATAFIX® PGA-PCL (Полиглекапрон)

STRATAFIX® – инновационный шовный материал с насечками для безузлового сопоставления тканей

Надежность

Насечки, расположенные по длине всей нити, являются дополнительными точками фиксации в тканях, что обеспечивает непревзойденную прочность и надежность шва без осложнений, связанных с наличием узлов.⁴³

Равномерное натяжение

STRATAFIX® обеспечивает равномерное контролируемое натяжение и аппроксимацию во время закрытия раны, что способствует хорошей регенерации тканей благодаря оптимальному кровоснабжению.

Быстрее без узлов

Благодаря насечкам, которые обеспечивают дополнительные точки фиксации, STRATAFIX® позволяет осуществить закрытие раны значительно быстрее, чем при наложении узлового или непрерывного шва традиционным шовным материалом.

Две конфигурации для соответствия выбранной технике

STRATAFIX® доступен в двух конфигурациях: однонаправленный и двунаправленный дизайн.

Однонаправленный дизайн имеет регулируемую петлю на конце для быстрой и удобной фиксации без применения узла.

Двунаправленный дизайн позволяет регулировать натяжение в тканях от середины раны для контроля закрытия обширных, изогнутых или нестандартных разрезов, а также анастомозов. Двунаправленный дизайн особенно эффективен для двурядного закрытия раны.

Срок полной абсорбции 90-120 дней.

Срок имплантации	Остаточная прочность
1 неделя	62%
2 недели	27%

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити*					Кол-во в коробке	
		1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)		5-0 (M0,7)
Ⓞ RB-1 (17 мм) 	20			SXMD1B404	SXMD1B403	SXMD1B402		12
Ⓞ RB-1 (17 мм) 	16x16				SXMD2B402	SXMD2B403		12
Ⓞ SH (26 мм) 	20			SXMD1B406	SXMD1B405			12
Ⓞ CT-1 (36 мм) 	45		SXMD1B409	SXMD1B408	SXMD1B407			12
Ⓞ MH (36 мм) 	14x14			SXMD2B400				12
	36x36			SXMD2B401				12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити*					Кол-во в коробке	
		1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)		5-0 (M0,7)
▼ PS-2 (19 мм) 	30					SXMD1B105		12
	60				SXMD1B104	SXMD1B106		12
▼ FS-2 (19 мм) 	7x7				SXMD2B404	SXMD2B405		12
	14x14				SXMD2B406	SXMD2B407		12
	30x30				SXMD2B408	SXMD2B409		12
▼ PS-1 (24 мм) 	30				SXMD1B100			12
	60				SXMD1B101			12
▼ FS-1 (24 мм) 	30x30				SXMD2B410	SXMD2B150		12
▼ FS (26 мм) 	14x14				SXMD2B411			12
	30x30				SXMD2B412	SXMD2B413		12
▼ PSL (30 мм) 	60			SXMD1B102				12

*размер соответствует прочности нити

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити*						Кол-во в коробке
		1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M0,7)	
▼ CP-2 (26 мм) 	14x14			SXMD2B414				12