



РАСХОДНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ  
**ОПЕРАЦИОННОЙ**

ПОЛНЫЙ СПЕКТР  
РЕШЕНИЙ, КОТОРОМУ  
**ВЫ МОЖЕТЕ ДОВЕРЯТЬ**



ШОВНЫЕ  
**МАТЕРИАЛЫ**

Каталог продукции 2018/2019

**Medtronic**  
Further. Together

# V-LOC™ PBT

Нерассасывающееся устройство для ушивания ран из полибутэстера

Надёжно. Быстро. Эффективно.



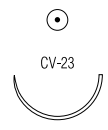
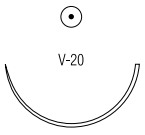
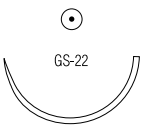
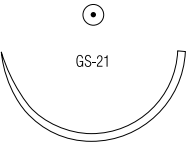
Революционная технология  
сопоставления тканей  
без завязывания узлов.

<b>Описание материала</b>	V-Loc™ PBT – нерассасывающееся устройство для закрытия ран, представляющее собой нерассасывающуюся нить с насечками, соединенную с хирургической иглой с одной стороны, и имеющую петлю с другой. Насечки и петля созданы для возможности соединять ткани без необходимости завязывания узлов. V-Loc™ PBT изготовлен из полибутэстера – кополимера бутилена терефталата и политетраметилена-гликолевого эфира. V-Loc™ PBT выпускается окрашенным в синий цвет. Устройство стерильно упаковано, инертно, не содержит антигенных структур.
<b>Показания</b>	V-Loc™ PBT предназначен для сопоставления мягких тканей, когда необходима их перманентная поддержка. Безопасность и эффективность V-Loc™ PBT не установлена при ушивании фасциальных дефектов (брюшная стенка, грудная клетка, фасциальные дефекты конечностей), межкишечных и сосудистых анастомозах, в нейрохирургии, офтальмологии и микрохирургии.
<b>Применение</b>	Исследования на животных показали, что V-Loc™ PBT вызывает лишь минимальную реакцию тканей, которая связана с имплантацией инородного тела в зависимости от окружающих тканей. Эксперименты на животных убедительно доказали отсутствие антигенной активности, системной токсичности, канцерогенности, мутагенности, тератогенности и негативных эффектов на репродуктивные функции организма.
<b>Срок поддержки раны</b>	Постоянная поддержка.
<b>Стерилизация</b>	Гамма излучение.
<b>Рассасывание</b>	Не рассасывается.
<b>Упаковка</b>	Шовный материал V-LOC™ PBT производится в окрашенном в синий цвет. Возможные варианты размеров от 1 USP (4 EP) до 3-0 USP (2 EP). Стерильный шовный материал поставляется с различными видами перманентно зафиксированных игл. Формируется в коробках по 12 шт.

Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.

## V-Loc™ PBT

V-Loc™ PBT - нерассасывающееся устройство для ушивания ран с однонаправленными насечками.

КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT								
Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
<b>1/2 круга 17 мм</b>	 CV-23	<b>3-0</b>	2	30	Синий	12	Surgalloy™	VLOCN0814
<b>1/2 круга 26 мм</b>	 V-20	<b>2-0</b>	3	30	Синий	12		VLOCN0615
		<b>3-0</b>	2	23	Синий	12		VLOCN0644
<b>1/2 круга 27 мм</b>	 GS-22	<b>0</b>	3.5	45	Синий	12		VLOCN1126
<b>1/2 круга 37 мм</b>	 GS-21	<b>1</b>	4	45	Синий	12		VLOCN0327
		<b>0</b>	3.5	45	Синий	12		VLOCN0326
		<b>2-0</b>	3	45	Синий	12		VLOCN0325