



## **Биохимический портативный экспресс-анализатор Accutrend Plus\***

*Профессиональное определение  
уровня холестерина в  
капиллярной крови*

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

# Основные характеристики Accutrend Plus

## Нормативная база



x	Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 сентября 2015 г. N 683н "Об утверждении Порядка организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях". Приложение №6, 3.	Стандарт оснащения центра здоровья
x	Приказ Минздрава РФ от 26.10.2017 N 869Н "Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения" .	Стандарт оснащения отделения (кабинета) медицинской профилактики для взрослых
x		Стандарт оснащения центра медицинской профилактики
x		Фельдшерский здравпункт, ФАП; отделение (кабинет) медицинской профилактики в том числе находящегося в составе центра здоровья;

**Приказа Министерства здравоохранения РФ от 13 марта 2019 г. № 124н "Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения"**

# Основные характеристики Accutrend Plus



Измеряемые параметры:





- Холестерин
- Глюкоза
- Лактат
- Триглицериды

Время получения результата: от 12 секунд до 3 минут

Тип пробы: капиллярная кровь

Объем пробы: свисающая капля крови

# Основные преимущества Accutrend Plus

-  **Легкость в использовании.** Крупный дисплей. Удобные кнопки. Звуковое оповещение.
-  **Безопасность.** Автоматическая проверка системы. Возможность выполнения измерения вне корпуса анализатора.
-  **Функциональность.** Память на 100 измерений на каждый параметр. Автоматическое выключение.
-  **Надежность и гарантия 5 лет.** Сервисная поддержка на протяжении всего гарантийного срока.

# Спецификация

## *Комплект поставки*

- Анализатор Аккутренд Плюс
- Руководство пользователя
- Четыре батареи (1,5 В, тип ААА)
- Гарантийный талон

**Гарантия 5 лет!**



# Спецификация

## Расходные материалы



### Тест-полоски

- **Холестерин\*** (арт.№11418262012)
- **Глюкоза\*** (арт.№11447475187)
- **Лактат\*** (арт.№03012654016)
- **Триглицериды\*** (арт.№11538144016)



### Ланцеты

- Устройство для получения капиллярной капли крови
- **Accu-Chek Safe-T-Pro Plus\*** (кат.№09199217001)
- **Accu-Chek Safe-T-Pro Uno\*** (кат.№09199209001)



### Контрольные материалы

- **Холестерин\*** (арт.№11418289190)
- **Глюкоза\*** (арт.№112848788190)
- **Лактат\*** (арт.№11447335190)
- **Триглицериды\*** (арт.№11538152190)

# Выполнение измерения

## Краткая инструкция



Включите прибор и вставьте тест-полоску в направляющую. Мигающая стрелка предложит вам открыть крышку прибора для нанесения крови



Получите каплю капиллярной крови и нанесите ее непосредственно на полоску



Закройте крышку прибора и дождитесь окончания анализа. Результат отобразится на дисплее и сохранится в памяти прибора

# Спасибо

## за внимание

---

\*РУ № ФСЗ 2008/02119  
РУ № ФСЗ 2010/06626  
РУ № ФСЗ 2008/00065  
РУ № РЗН 2018/7173

COBAS, ACCUTREND PLUS является товарными знаками Рош

Опубликовано:

ООО «Рош Диагностика Рус»

115114, Россия, г.Москва, ул.Летниковская, д.2, стр.2

Бизнес-центр «Вивальди-плаза»

[www.rochediagnostics.ru](http://www.rochediagnostics.ru)

*Предназначено для медицинских специалистов.*

*Данная презентация является нашей интеллектуальной собственностью. Без нашего письменного согласия она не может быть ни скопирована, ни использована для производства, ни передана третьим лицам.*