

Три простых шага для получения точного результата¹



- 1** Включите прибор и вставьте тест-полоску в направляющую. Мигающая стрелка предложит Вам открыть крышку прибора для нанесения крови.
- 2** Получите каплю капиллярной крови и нанесите ее непосредственно на полоску.
- 3** Закройте крышку прибора и дождитесь окончания анализа. Когда измерение будет завершено, результат отобразится на дисплее и сохранится в памяти прибора.



Измеряемые параметры

Измеряемые параметры	Диапазон измерения, ммоль/л	Время анализа
Холестерин	3,88-7,76	3 мин
Глюкоза	1,1-33,3	12 сек
Триглицериды	0,8-6,86	3 мин
Лактат	0,8-22	1 мин

1. Важно: Перед началом процедуры тестирования внимательно ознакомьтесь с инструкцией прибора Аккутренд® Плюс


© 2021 Рош
ООО «Рош Диагностика Рус»:
Россия, 115114, Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2,
Бизнес-центр «Вивальди Плаза»
Тел.: +7 495 229-69-99
diagnostics.roche.com

Помните!

- Высокий уровень холестерина** — повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний
- Высокий уровень глюкозы** — повышенный риск гипергликемии, диабета
- Высокий уровень триглицеридов** — повышенный риск развития ишемической болезни сердца
- Высокий уровень лактата** — перетренированность в спорте, хроническая усталость

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ

Узнайте Ваш уровень холестерина в любое время в любом месте с помощью экспресс-анализатора Аккутренд® Плюс

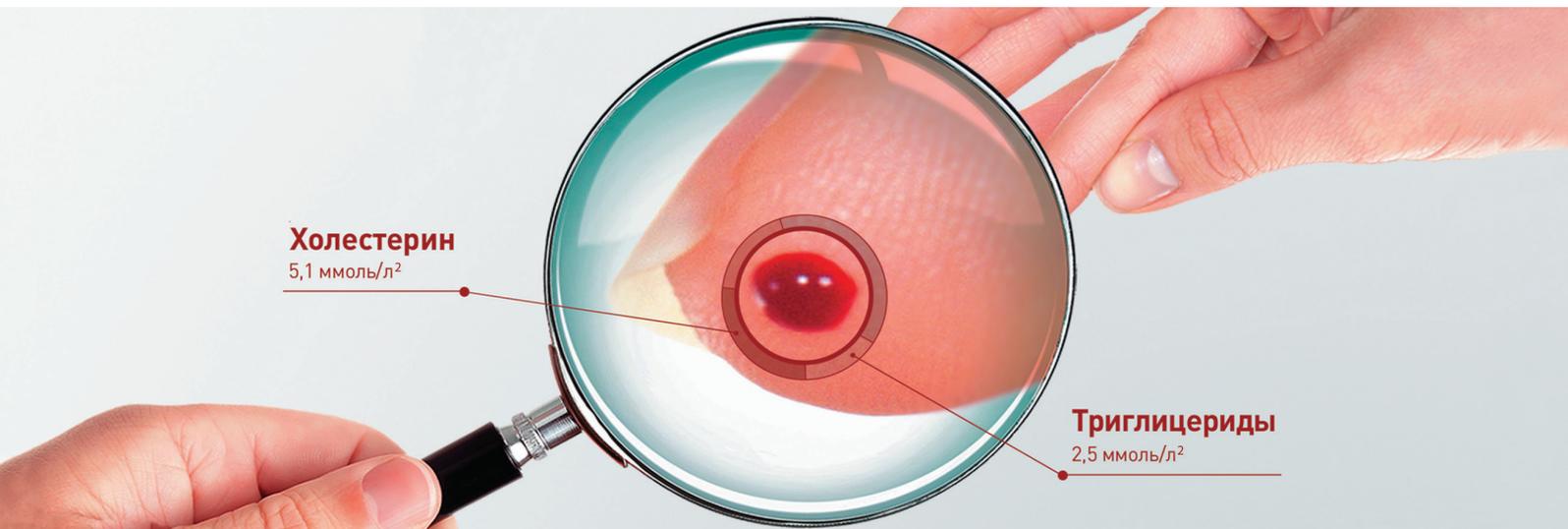

Холестерин

5,1 ммоль/л²

Триглицериды

2,5 ммоль/л²



Портативный прибор для количественного определения двух основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Экспресс-анализатор Аккутренд® Плюс позволяет быстро и просто определить уровень общего холестерина и триглицеридов из образца капиллярной крови.



(8-800) 100-68-96 Горячая линия (звонок по России бесплатный)

2. Пример показателей здорового взрослого человека. Клиническая лабораторная диагностика. Национальное руководство / Долгов В.В., Меньшиков В.В.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. 1736 с.

Товар сертифицирован. Реклама. Рег. уд. №ФСЗ 2008/02119 от 28.12.2015 г.

cobas®

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ